

歯周外科のエキスパートが選んだ


歯周外科  
専用

# 歯周外科用バー

これまで、歯周外科にどんなバーを使用していましたか？

歯周外科のエキスパートであるJIADSの講師陣が世界から選んだ、使いやすさ折り紙つきのバーです。

●骨整形や歯冠整形専用のロングシャンクのフルラインナップ登場！

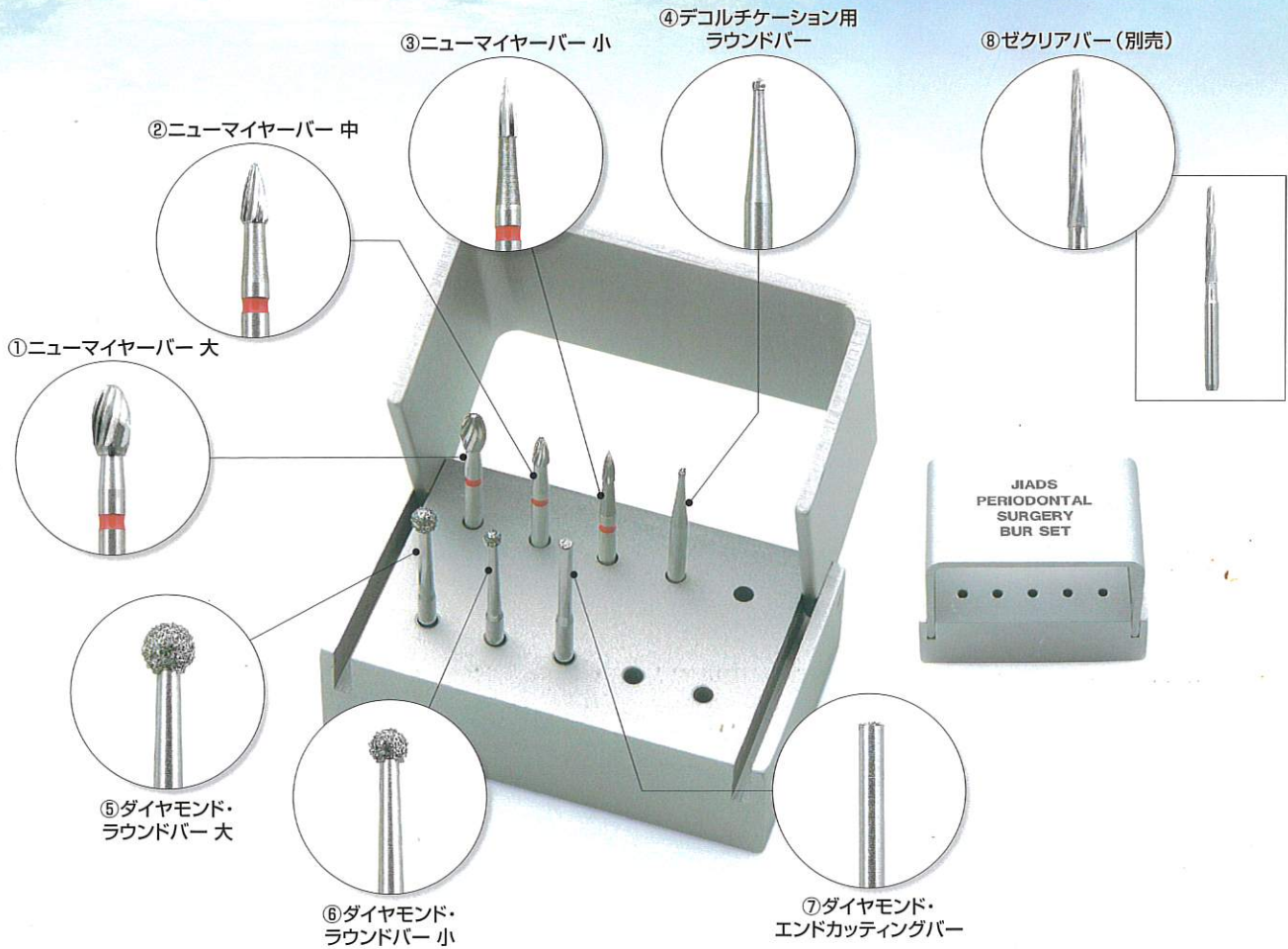

## JIADS歯周外科用バー

●ニューマイヤーバー(カーバイドバー) ①大 ②中 ③小  
根面に付着した歯石などの沈着物、骨内欠損部や抜歯窩の炎症性肉芽組織を短時間で除去するために用います。また、エナメルプロジェクションの除去や根分岐部、骨欠損に隣接した根面または骨のデブライドメントにも効果的です。

●デコルチケーション用ラウンドバー ④  
GTR、GBRの際の皮質骨穿孔に用いるバー。

●ダイヤモンド・ラウンドバー ⑤大 ⑥小  
骨の不整形態を整えるためのバーです。切除する量や部位により大小を使い分けます。

●ダイヤモンド・エンドカッティングバー ⑦  
底面だけにダイヤモンド粒子が着いており、側面が切れないため、縁下カリエス処置の際の歯牙周囲の骨削除に最適なバー。

●専用バースタンド  
滅菌可能なケースです。

●ゼクリアバー ⑧  
歯冠延長術や歯根分割またはOdontoplastyに効果的なバーです。根面に付着した沈着物や軟組織を除去する際にも用います。

**注意**  
発熱を防ぐため低回転でご使用ください。また、十分な注水を心がけてください。